

ACKERMANN clino

by Honeywell



Bedienungs-
anleitung

D

DECT Handset

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Willkommen bei der Bedienungsanleitung des Ackermann Handgerätes | 4 |
| 2. Inbetriebnahme | 4 |
| 2.1 Akku | 4 |
| 2.2 Akkus laden | 4 |
| 2.3 Akkus wechseln | 4 |
| 2.4 Ladegerät | 4 |
| 2.5 Kopfhörer | 5 |
| 2.6 Clip | 5 |
| 3. Beschreibung | 6 |
| 3.1 Bedienung der Tastatur | 6 |
| 3.2 Tastenfunktionen | 6 |
| Alarmtaste | 7 |
| LED | 7 |
| Display | 7 |
| Navigationstasten | 7 |
| Lautstärke einstellen | 7 |
| OK / MUTE (lautlos) / Ausschalten | 7 |
| Hörer abgenommen / Hörer aufgelegt ... | 7 |
| R / MAIL (SMS)..... | 7 |
| # / SILENT (lautlos) | 7 |
| Mikrofon | 7 |
| Ladegerätanschluss | 7 |
| * / LOCK (SPERREN) | 7 |
| Menü | 7 |
| C (Clear) (Löschen) / Back (Zurück) | 8 |
| REDIAL (Wahlwiederholung) | 8 |
| Kopfhöreranschluss | 8 |
| 3.3 Tastenbelegung | 8 |
| 4. Ein- / Ausschalten | 8 |
| 4.1 Einschalten | 8 |
| 4.2 Ausschalten | 8 |
| 5. Anrufe | 9 |
| 5.1 Ankommende Anrufe | 9 |
| 5.1.1 Gespräche annehmen..... | 9 |
| 5.1.2 Rufton vorübergehend auf lautlos stellen | 9 |
| 5.1.3 Gespräche beenden | 9 |
| 5.2 Rufnummern wählen | 9 |
| 5.2.1 Rufnummern wählen | 9 |
| 5.2.2 Gespräche beenden | 9 |
| 5.3 Wahlwiederholung | 10 |
| 6. Während eines Anrufs | 10 |
| 6.1 Gespräch weiterleiten (Funktion ist ab- hängig von der TK-Anlage) | 10 |
| 6.2 Mikrofon lautlos stellen | 10 |
| 6.3 Lautstärke einstellen | 10 |

| | |
|---|----|
| 7. Mitteilung (SMS) | 11 |
| 7.1 Mitteilung empfangen | 11 |
| 7.2 Mitteilung senden | 12 |
| 8. Das Telefonbuch | 12 |
| 8.1 Bedienung des Telefonbuchs | 12 |
| 8.2 Rufnummern wählen | 12 |
| 8.3 Namen und Rufnummern eingeben | 12 |
| 8.4 Namen und Rufnummern ändern | 13 |
| 9. Einstellungen | 13 |
| 9.1 Ruftöne | 13 |
| 9.2 Ruftonlautstärke | 13 |
| 9.3 Tastenton | 13 |
| 9.4 Vibrationsalarm | 13 |
| 9.5 Rufannahme | 14 |
| 9.6 Lautstärke | 14 |
| 9.7 Außer Reichweite (kein Empfang) | 14 |
| 9.8 Hintergrundbeleuchtung | 14 |
| 9.9 Automatische Tastensperrung | 14 |
| 9.10 Sprache | 15 |
| 10. Menüstruktur | 15 |
| 10.1 Allgemeine Menüstruktur | 15 |
| 10.2 Profileinstellung | 16 |
| 11. Login | 16 |
| 11.1 Login | 16 |
| 12. Wartung | 18 |
| 12.1 Sicherheit | 18 |
| 12.2 Akku Entsorgen | 18 |
| 12.3 Behandlung | 18 |
| 12.4 Reinigung | 18 |
| 13. Fehlersuche | 18 |
| 14. Technische Spezifikation | 19 |

1. Willkommen bei der Bedienungsanleitung des Ackermann Handgerätes




Diese Bedienungsanleitung beschreibt die allgemeinen Eigenschaften des Handgerätes.

2. Inbetriebnahme

2.1 Akku

Das Handgerät wird mit Akku geliefert.

2.2 Akku laden

Der Akku muss aufgeladen werden, wenn die Akkuanzeige leer / fast leer anzeigt , oder wenn das Handgerät nicht eingeschaltet werden kann. Der Akku braucht ca. 3,5 Stunden um vollständig aufgeladen zu werden . Wenn der Akku vollständig leer ist, kann es einige Minuten dauern, bis der Ladevorgang beginnt. Während des Ladens zeigt das Display eine Reihe gefüllter / nicht gefüllter Quadrate. Wenn das Handgerät zum Laden in das Ladegerät gestellt wird, ist ein Symbol für die Aufladen auf dem Display sichtbar . Das Ladegerät nicht in direktes Tageslicht legen. Der Vibrationsalarm und die Funktion für Rufannahme funktionieren nicht, während sich das Handgerät im Ladegerät befindet.

2.3 Akkus wechseln

Die Lebensdauer des Akkus hängt davon ab, wie oft der Akku aufgeladen worden ist. Der Akku kann ca. 500-mal aufgeladen werden. Das heißt, wenn Sie den Akku zweimal täglich aufladen, hat der Akku eine Lebenserwartung von ungefähr einem Jahr. Wenn die Standby-Zeit (130 Stunden) zu kurz wird, sollten Sie den Akku auswechseln.

Der Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Handgeräts.

1. Drehen Sie die beiden Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher heraus.
2. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
3. Ziehen Sie den Akkustecker heraus und nehmen Sie den Akku heraus.
4. Bringen Sie den neuen Akkustecker an.
5. Legen Sie den neuen Akku so in das Fach, dass Sie die Schrift auf dem Akku lesen können.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und schrauben Sie die Schrauben wieder fest.
7. Stellen Sie das Handgerät in das Ladegerät.



2.4 Ladegerät

Das Ladegerät dient dazu den Akku des Handgeräts aufzuladen. Das Ladegerät wird mit Stromversorgung geliefert. Zum korrekten Aufladen sollte man das Handgerät und das Ladegerät nicht in direktes Tageslicht legen. Die Raumtemperatur sollte zwischen 0°C und 25°C liegen.



2.5 Kopfhörer

Ackermann empfiehlt Ihnen einen Kopfhörer zu benutzen, wenn Sie das Handgerät häufig verwenden. Der Kopfhöreranschluss befindet sich auf der linken Seite des Handgeräts.



2.6 Clip

Wenn Sie einen Clip benutzen, können Sie das Handgerät einfach am Gürtel oder in einer Tasche tragen.

1. Drehen Sie die obere Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus und drehen Sie den Knopf.
2. Drehen Sie die Schraube wieder fest.
3. Befestigen Sie den Clip am Handgerät.
4. Nehmen Sie den Clip ab, indem Sie auf die Feder drücken.

3. Beschreibung



3.1 Bedienung der Tastatur

Unter jeder Taste sind Buchstaben und Zeichen, die Sie eingeben können, wenn Sie die Tastatur zum Text schreiben benutzen. Beim Schreiben des Textes können Sie „0“ als Leertaste verwenden, und „*“, für Groß- und Kleinschreibung.

3.2 Tastenfunktionen

Das Handgerät hat 22 Tasten. Zwei Tasten zur Lautstärkeregelung befinden sich auf der rechten Seite des Handgeräts, und eine rote Alarntaste befindet sich oben auf dem Handgerät.

1 Alarmtaste

Eine leicht zugängliche, rote Alarmtaste befindet sich oben auf dem Handgerät. Die Alarmtaste wird für Notrufe benützt.

2 LED

Die LED zeigt ankommende Anrufe, SMS und Alarme an.

3 Display

Das Display hat 4 Zeilen für Text und Symbole jeweils mit 12 Zeichen. Maximal 36 Zeichen.

Beleuchtetes Display mit einstellbarem Zeitschalter für Hintergrundbeleuchtung. Der Text auf dem Display kann rotiert werden.

4 Navigationstasten

Die zwei Navigationstasten dienen dazu Menüs und Listen durchzugehen. Drücken Sie rechts oder links, um die verschiedenen Möglichkeiten anzuzeigen. Die rechte Taste wird verwendet, um das Telefonbuch in Standby-Modus zu benützen.

Die linke Taste wird verwendet, um die Anrufliste in Standby-Modus aufzurufen.

5 Lautstärke einstellen

Den Lautstärker des Handgeräts während eines Anrufs lauter oder leiser stellen.

6 OK / MUTE (lautlos) / Ausschalten

OK: Wahlmöglichkeiten werden mit dieser Taste akzeptiert und bestätigt, wenn Sie im Menü sind.

MUTE (lautlos): Schaltet das Mikrofon des Handgeräts während eines Anrufs aus oder ein.

Ausschalten: Schalten Sie das Handgerät aus, indem Sie diese Taste 3 Sekunden lang drücken.

7 Hörer abgenommen / Hörer aufgelegt

Einen Anruf beantworten und beenden, oder das Telefon einschalten mit dieser Taste.

8 R / MAIL (Mitteilungen)

Anruf halten und wieder übernehmen. Anruf zu einem anderen Handgerät weiterleiten. Abrufen der Nachrichtenliste (Mitteilungen) in Standby-Modus. Bis zu 14 Nachrichten/Alarme werden im Ackermann System gespeichert.

9 # / SILENT (lautlos)

Drücken Sie Menü # um den Rufton lautlos zu stellen.

 wird auf dem Display erscheinen


10 Mikrofon

Das Mikrofon befindet sich unterhalb der Tastatur.

11 Ladegerätanschluss

Siehe Abschnitt „Inbetriebnahme“ auf Seite 4.

12 * / LOCK (SPERREN)

MENU (MENÜ) und * betätigen, um die Tastatur in Standby-Modus zu entsperren. Das Zeichen für Tastensperre  ist auf dem Display sichtbar.

13 Menü

Benützen Sie das Menü in Standby-Modus mit dieser Taste.

14 C (Clear) (Löschen) / Back (Zurück)

Löschen Sie das zuletzt eingegebene Zeichen oder gehen Sie zurück beim Text schreiben. Im Menü-Modus wird diese Taste verwendet, um Schrittweise zurückzugehen.

15 REDIAL (Wahlwiederholung) /

Die Wahlwiederholungsfunktion ermöglicht Ihnen, die zuletzt gewählten Rufnummern in Standby-Modus wieder zu wählen.

16 Kopfhöreranschluss


Den Gummistecker auf der linken Seite des Hörers öffnen, um einen Kopfhörer anzuschließen.


3.3 Tastenbelegungen


| Taste | Großschreibung | Kleinschreibung |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ? ! 1 - + * / = & () % ¿ ¡ | ? ! 1 - + * / = & () % ¿ ¡ |
| 2 | A B C 2 Ä Å À Á Ã Ä Æ Ç | a b c 2 ä å à á ã ä æ ç |
| 3 | D E F 3 È É Ê Ë | d e f 3 è é ê ë |
| 4 | G H I 4 Ì Í Î Ï | g h i 4 ì í î ï |
| 5 | J K L 5 | j k l 5 |
| 6 | M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ø | m n o 6 ñ ò ó ô õ ø |
| 7 | P Q R S 7 ß | p q r s 7 ß |
| 8 | T U V 8 Ü Ú Ú Û Ü | t u v 8 ü ú û ü |
| 9 | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
| 0 | [Leertaste], . 0 : ; _ " ' ^ ~ | [Leertaste], . 0 : ; _ " ' ^ ~ |
| # | # @ E \$ £ ¥ § < > { } [\] | # @ E \$ £ ¥ § < > { } [\] |
| * | Groß- / Kleinbuchstaben | |

4 Ein- / Ausschalten

4.1 Einschalten

Betätigen Sie die „Hörer“  Taste bis das Display aufleuchtet. Wenn das Handgerät eingeschaltet und in ein System eingeloggt ist, erscheint das Symbol  in der linken Ecke des Displays. (Siehe Abschnitt „Login“ auf Seite 16.)

Wenn das Handgerät sich nicht einschalten lässt oder der Akku leer / fast leer ist , Akku wieder aufladen.

Hinweis! Wenn das Symbol  für Empfang nicht auf dem Display sichtbar ist, können keine Anrufe gemacht oder empfangen werden.

4.2 Ausschalten

Betätigen Sie die MUTE Taste  bis das Display nichts mehr anzeigt.

Hinweis! Wenn das Handgerät außer Reichweite ist, kann es bis zur 30 Sekunden dauern bis das Handgerät wieder auf Empfang ist.


5 Anrufe

Das Handgerät muss in ein System eingeloggt werden, bevor Sie einen Anruf machen oder ein Anruf annehmen können.


(Siehe Abschnitt „Login“ auf Seite 16.)

5.1 Ankommende Anrufe

5.1.1 Gespräche annehmen

Ein Anruf wird durch ein Rufton und ein schnell blinkendes LED angezeigt. Drücken Sie die „Hörer“  Taste, um das Gespräch anzunehmen. Je nach Telekommunikationsanlage und Einstellung ist die Rufnummer auf dem Display sichtbar.

5.1.2 Rufton vorübergehend auf lautlos stellen

Sie können den Rufton vorübergehend auf lautlos stellen, ohne das Gespräch anzunehmen. Betätigen Sie die MUTE (lautlos)  Taste, um das Klingeln vorübergehend abzuschalten. Der Text „RUFTON LAUTLOS“ erscheint auf dem Display.


Hinweis! Sie können jederzeit ein Gespräch annehmen, oder das Handgerät programmieren, auch wenn Sie gerade anrufen.


5.1.3 Gespräche beenden

Drücken Sie die „Hörer“  Taste, um den Anruf zu beenden.

5.2 Rufnummern wählen

5.2.1 Rufnummern wählen

Wie man interne und externe Rufnummern wählt. Die Nummer wählen. Auf dem Display wird die Nummer angezeigt. Betätigen Sie die „Hörer“  Taste.

Das Handgerät ist somit abgenommen und wählt die gewünschte Nummer. Das Symbol für „abgenommener Hörer“  blinkt auf dem Display, bis Sie mit der gewünschten Nummer verbunden sind.

Hinweis! Korrigieren Sie falsch eingegebene Nummern durch drücken der C-Taste. Sie können schneller anrufen, indem Sie die Kurzwahl-Funktion verwenden.

5.2.2 Gespräche beenden

Betätigen Sie die „Hörer“  Taste.


5.3 Wahlwiederholung

Sobald Sie eine externe Rufnummer wählen, wird diese Nummer automatisch gespeichert, ob Sie verbunden worden sind oder nicht.

Drücken Sie REDIAL (Wahlwiederholungstaste)



, um die Liste der zuletzt gewählten externen Nummern abzurufen.

Benützen Sie die Navigationstasten , um durch die Wahlwiederholungsliste zu blättern.



Bestätigen Sie die „Hörer“  Taste und das Symbol für „Hörer abgehoben“  blinkt bis Sie verbunden werden.

6. Während eines Anrufs

Ackermann Handgerät ermöglichen verschiedene Methoden mit Anrufen umzugehen.


6.1 Gespräche weiterleiten. (Funktion ist abhängig von der TK-Anlage)


Sie haben eine Rufnummer gewählt und möchten den Anruf an ein anderes Handgerät weiterleiten. Betätigen

Sie die R Taste  und wählen Sie die gewünschte Nummer. Drücken Sie die „Hörer“  Taste, um das Gespräch weiterzuleiten.

6.2 Mikrofon lautlos stellen


Wenn Sie das Mikrofon während eines Gesprächs abstellen wollen:

Drücken Sie MUTE (lautlos)  und der Text „MIK LAUTLOS“ wird angezeigt. Der Anrufer kann keine Gespräche im Raum mithören.

Drücken Sie noch einmal auf MUTE (lautlos) , um das Mikrofon wieder einzuschalten.

6.3 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke durch die Betätigung der beiden „volume“(Lautstärke) Tasten regulieren.

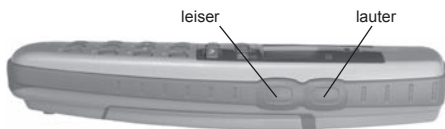


7 Mitteilung (SMS)

Sie können SMS auf Ihrem Ackermann Handgerät senden und empfangen. Diese Funktion ist speziell und benötigt Software des Hauptsystems.

7.1 Mitteilung empfangen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, fängt der LED an zu blinken und ein Warnton erklingt.

Wenn Sie während eines Anrufs eine SMS empfangen, hören Sie einen kurzen Piepton im Handgerät. Die SMS wird in der Nachrichtensliste gespeichert. Das Symbol für neue Nachrichten  erscheint im Display. Das Symbol bleibt sichtbar bis die Nachricht gelesen wurde. Die Länge des Textes einer SMS ist auf 36 Zeichen beschränkt. In der Nachrichtensliste ist genug Speicherplatz für 14 SMS. Wird eine neue SMS empfangen oder gesendet, wird die älteste entspernte SMS automatisch gelöscht. Sie können bis zur 7 Nachrichten sperren. Eine gesperrte SMS kann nicht automatisch gelöscht werden, aber Sie können sie manuell löschen.

Navigation:

MENÜ >> MITTEILUNG >> LESEN


Drücken Sie 


„MITTEILUNG“ wählen


Folgende Optionen sind verfügbar:

- LESEN
- SCHREIBEN
- VORLAGEN (Bis zu 10 vorgegebene Vorlagen.)

Navigieren auf Option „LESEN“ und drücken Sie

OK  , um die Nachrichtensliste abzurufen. Gehen Sie durch die Nachrichtensliste. Betätigen Sie OK

 , um die Nachricht zu lesen.

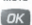Drücken Sie OK  , um die Nachrichten zu löschen.

Die Navigationstasten  betätigen, um zur nächsten Menüwahl für Nachrichten zu gelangen.

Hinweis! Der erste Buchstabe in der ersten Reihe des Displays zeigt den Status der SMS an:
R = read (lesen), N = not read (nicht gelesen) und L = locked (gesperrt)

7.2 Mitteilung senden

Wenn Sie die MAIL  Taste drücken und Sie haben keine eingegangenen SMS, gelangen Sie zur Menü Option „VERFASSEN ?“. Schreiben Sie Ihre Nachricht mit Hilfe der alphanumerischen Tasten.

Navigation:

MENÜ >>MITTEILUNG >> VERFASSEN ?

Drücken Sie

Gehen Sie zu „MITTEILUNG“


Folgende Optionen sind verfügbar:

- LESEN
- SCHREIBEN
- VORLAGEN

Gehen Sie zur Option „SCHREIBEN“ und drücken Sie

OK .

Schreiben Sie Ihre SMS und drücken Sie OK .


Die Nummer wählen, zu der Sie Ihre SMS schicken möchten und mit OK  bestätigen, um die Nachricht zu senden.




8 Das Telefonbuch

Das Ackermann Handgerät ist mit einem eingebauten Telefonbuch ausgerüstet, in dem Sie bis zu 60 Eintragungen speichern können (Namen und Rufnummern). Sie können das Telefonbuch über Menü Option TELEFONBUCH aufrufen und ändern. Sie können Kontakte im Telefonbuch hinzufügen, entfernen und ändern.

8.1 Bedienung des Telefonbuchs

Um Namen und Telefonnummern aufzurufen,

drücken Sie die BOOK (BUCH)  Taste.

Benützen Sie die Navigationstasten  oder geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. Drücken Sie die „Hörer“ Taste  und das Symbol „Hörer abgenommen“  blinkt bis Sie verbunden werden.

8.2 Rufnummern wählen

Nach einem Namen und einer Nummer im Telefonbuch suchen.

Navigation:

MENÜ >> TELEFONBUCH >> ANRUFEN

8.3 Namen und Rufnummern eingeben


Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein, drücken


Sie die BOOK (BUCH) Taste , drücken Sie

OK  schreiben Sie den Namen Ihres Kontakts.


Betätigen Sie OK  zum Speichern.

8.4 Namen und Rufnummern ändern

Drücken Sie die BOOK (BUCH)  Taste. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Namens ein und suchen Sie mit Hilfe der Navigationstasten

 den gewünschten Namen.

Drücken Sie OK .

Wählen Sie die Option „LÖSCHEN“, „BEARBEITE NR“, „EINTRAG BEAR“. Drücken Sie OK .

Drücken Sie OK , um zu speichern.

9 Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt die unterschiedlichen Einstellungen auf Ihrem Handgerät.

9.1 Ruftöne

Sie können bei Ihrem Handgerät verschiedene Ruftöne auswählen. Das Handgerät hat bis zu 16 verschiedene Ruftöne.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >> PROFIL1 >> RUFTON

9.2 Ruftonlautstärke

Stellen Sie die Ruftonlautstärke Ihres Handgeräts ein. Das Handgerät hat 5 unterschiedliche Lautstärken und „OFF (AUS)“.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >> PROFIL1 >> LAUTSTÄRKE

9.3 Tastenton

Tastenklick ist der Ton, den Sie hören, wenn Sie eine Taste betätigen. Diese Funktion hat 5 verschiedene Einstellungen und „AUS“ zur Auswahl.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >> PROFIL1 >> TASTEN TON

9.4 Vibrationsalarm

Es ist möglich den Vibrationsalarm Ihres Ackermann Handgeräts zu aktivieren. Diese Eigenschaft ist nützlich, wenn Sie nicht durch das Klingeln Ihres Handgeräts gestört werden möchten. Sie werden trotzdem benachrichtigt, wenn Sie den Vibrationsalarm aktivieren.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >> PROFIL1 >> VIBRATION

9.5 Rufannahme

Diese Funktion aktiviert „Hörer abgenommen“ automatisch wenn Sie angerufen werden. Wenn das Handgerät in einem System eingeloggt ist, wird der Hörer nach Beendigung des Anrufs automatisch „aufgelegt“.

(Diese Eigenschaft wird nicht auf allen TK-Anlagen unterstützt und muss in der Zentraleinheit programmiert werden.)

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >> PROFIL1 >> RUFANNAHME

9.6 Lautstärke

Das Handgerät wird mit einer Grundeinstellung des Lautsprechers geliefert. Sie können die Lautstärke im Menü einstellen oder mit Hilfe der zwei Lautstärketasten auf der rechten Seite des Handgeräts.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >>PROFILE 1 >> LAUTSPRECHER

9.7 Außer Reichweite (kein Empfang)

Wenn diese Funktion aktiviert wird, hören Sie einen kurzen Piepton, wenn Sie Kontakt mit dem System verlieren und Sie außer Reichweite sind.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >>PROFILE 1 >> REICHWEITE

9.8 Hintergrundbeleuchtung

Das Handgerät hat ein Display, das beleuchtet wird, wenn eine Taste betätigt wird. Sie können die gegebene Einstellung für die Hintergrundbeleuchtung ändern.

Navigation:


MENÜ >> PROFILE >> PROFIL 1 >> BELEUCHTUNG

9.9 Automatische Tastenspernung

Um zu verhindern, dass versehentlich Tasten betätigt und Rufnummern gewählt werden, können Sie die Tasten mit dieser Funktion sperren.

Navigation:

MENÜ >> PROFILE >> PROFIL 1 >> TAST. SPERRE

Hinweis! Wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie das Handgerät nicht benutzen. Wenn eine Taste betätigt wird, erscheint das Symbol  TASTENSPERRE. Drücken Sie MENÜ *, um die Tasten zu entsperren. Sie können trotz Tastensperre Anrufe annehmen. Wenn Sie Ihren Anruf beendet haben, sind die Tasten wieder gesperrt.

9.10 Sprache

Die Grundeinstellung ist englisch. Um ein andere Sprache zu wählen, verwenden Sie die Option SPRACHE.

Optionen sind schwedisch, deutsch, französisch, holländisch, dänisch und finnisch.

Navigation:

MENÜ >> SPRACHE

10. Menüstruktur

10.1 Allgemeine Menüstruktur

Drücken Sie MENÜ, in Standby-Modus (aufgelegt). Siehe unten.

MENÜ

| MITTEILUNG | ANRUF | TELEFONBUCH | PROFILE |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|
| LESEN SCHREIBEN VORLAGEN | WAHLWIEDERH. LAUTSPRECHER | ANRUFER | PROFIL 1 PROFIL 2 |

| BATTERIE | EINSTELLUNG | SPRACHE |
|----------|--|--|
| | ZEIT LOGIN MENÜ SPERRE EXT. SERVICE | SVENSKA DEUTSCH FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SUOMI |

MENU



Menü öffnen.

REDIAL

BOOK



Navigationstasten.

MUTE



Auswahl bestätigen. Zum Untermenü gehen.



Zurück zum vorherigen Menü.

10.2 Profileinstellungen

Das Handgerät hat zwei benutzerdefinierte Profile. Wie ein Profil definiert wird, sieht man unten:

PROFILE 1

| RUFTON | LAUTSTÄRKE | TASTEN TON |
|---------------|-------------------|-------------------|
| TON 1 | AUS | AUS |
| TON 2 | LEVEL 1 | LEVEL 1 |
| TON 3 | LEVEL 2 | LEVEL 2 |
| TON 4 | LEVEL 3 | LEVEL 3 |
| TON 5 | LEVEL 4 | LEVEL 4 |
| TON 6 | LEVEL 5 | LEVEL 5 |
| TON 7....16 | | |

| VIBRATION | RUFANNAHME | LAUTSPRECHER |
|------------------|-------------------|---|
| EIN AUS | EIN AUS | LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 |

| REICHWEITE | BELEUCHTUNG | TAST. SPERRUNG |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| EIN AUS | EIN AUS | EIN AUS |

MENU



Menü öffnen.

REDIAL



Navigationstasten.

MUTE



Auswahl bestätigen. Zum Untermenü gehen.



Zurück zum vorherigen Menü.

11 Login

11.1 Login

Das Handgerät muss bei ein System registriert und eingeloggt werden, bevor es benützt werden kann.

Das Handgerät kann bei 10 unterschiedlichen Systemen registriert werden.

Login erstellen (registrieren)

Navigation:


MENÜ >> EINSTELLUNGEN >> LOGIN >> ERSTELLEN

Das Handgerät sucht nach verfügbaren Systemen (das System muss für neue Registrierungen aktiviert werden). Wenn mehr als ein System verfügbar ist, wird das Symbol


REDIAL BOOK



bol  auf dem Display angezeigt. Benützen

REDIAL BOOK

Sie , um das passende System zu finden. Wenn Sie das richtige System gefunden haben, drücken

MUTE

Sie  (nehmen Sie Kontakt mit Ihrem System Administrator auf, um das System ID zu bekommen). Einige Systeme verwenden einen Authentifizierungscode AC, um ein neues Handgerät zu registrieren (Kontakt mit Ihrem System Administrator aufnehmen).


Wenn keine AC verwendet wird, drücken Sie  . Das Handgerät wird sich jetzt bei dem System anmelden und ein neues Login erstellen. Wenn das Login nicht funktioniert, ist das Handgerät möglicherweise im System nicht definiert (Kontakt mit Ihrem System Administrator aufnehmen), oder das Handgerät ist schon bei 10 Systemen angemeldet. In diesem Fall müssen Sie eins der vorhandenen Systeme entfernen. Siehe „Login entfernen“.

System ändern (Login)

Navigation:

MENÜ >> EINSTELLUNGEN >> LOGIN >> AUSWÄHLEN

REDIAL BOOK

Benützen Sie  um die verschiedenen Systeme im Handgerät auszuwählen. Ein „*“ zeigt bei welchem System das Handgerät im Moment eingeloggt ist. Wenn das Handgerät auf „AUTO“ eingestellt ist, wird es sich beim ersten angemeldeten System einloggen, das es findet.

MUTE



Drücken Sie  um ein System zu selektieren.

Login entfernen




Wenn das Handgerät nicht mehr in Verbindung mit einem System gebraucht wird, kann es vom Handgerät entfernt werden, um Platz für ein anderes System zu schaffen.

Navigation:

MENÜ >> EINSTELLUNGEN >> LOGIN >> LÖSCHEN

Geben Sie das Codewort für das Handgerät ein (Standardnummer vom Werk „0000“) und drücken Sie  .

REDIAL BOOK

Benützen Sie , um die verschiedenen Systeme aufzurufen. Drücken Sie  , um das ausgewählte System zu entfernen.

Das Handgerät muss bei einem System registriert und eingeloggt werden, bevor es benützt werden kann. Das Handgerät kann bei 10 unterschiedlichen Systemen gleichzeitig eingeloggt sein.

12 Wartung

Hinweis! Wenn Ihr Handgerät eine Inspektion braucht, sollten Sie es zum Großhändler oder Einzelhändler zurückbringen, bei dem Sie es erworben haben, oder nehmen Sie Kontakt mit Ackermann auf, um Serviceanweisungen zu bekommen.

12.1 Sicherheit

Benützen Sie Ihr Handgerät und Ladegerät nicht an Orten, wo die Gefahr einer elektrischen ausgelösten Explosion besteht.

12.2 Akku Entsorgung

Akkus müssen zu einer Entsorgungsstelle für Akkus gebracht werden.

12.3 Behandlung

Halten Sie Ihr Handgerät und das Ladegerät von Hitze und Feuchtigkeit fern.

12.4 Reinigung

Reinigen Sie Ihr Handgerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie weder Seife noch Reinigungsmittel.

13 Fehlersuche

13.1 Checkliste

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|--|--|---|
| Das Handgerät funktioniert nicht. | Der Akku ist leer / fast leer oder das Handgerät ist defekt. | Den Akku entfernen. Den Akku wieder einsetzen und das Handgerät einschalten. Akku aufladen. |
| Kein Rufton. | „Rufton aus“ Symbol angezeigt, oder Handgerät defekt. | „Aus“ Symbol angezeigt = Lautstärke einstellen. |
| Das Handgerät kann System ID nicht finden beim „ERSTELLEN“. | Systemeinstellung. | Kontrollieren, ob das System auf „TEILNAHME ZULÄSSIG“ |
| Das Handgerät kann nicht eingeloggt werden, trotz vorhandenem System ID. | Authentifizierungscode (AC) fehlt. | Kontrollieren, ob Sie einen Authentifizierungscode (AC) benötigen. |
| Das Handgerät kann nicht eingeschaltet werden. | Der Akku ist leer / fast leer oder defekt. | Akkuanschlüsse prüfen. Akku aufladen. |

14 Technische Spezifikation

Maße

(L x B x H) 152 x 53 x 27 mm

Gewicht (inkl. Akku)

138g

Display

118 x 65 Pixels LCD, beleuchtete Graphik

Umgebung

Betriebstemperatur 0°– 40°

Sprechzeit / Standby Zeit

12h/130h

Spezifikationen

TBR-6 DECT RF

TBR-22 GAP

EMV ETS 300 329 (CE-Beschriftung)

TBR-10 Akustik

Notizen



Notizen



Unsere Druckschriften und elektronischen Medien sollen nach bestem Wissen beraten, eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck der Druckschriften und Erstellung von Kopien der elektronischen Medien - auch auszugsweise - nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Änderungen unserer Systeme und Bauteile als Folge fortschreitender Entwicklung behalten wir uns vor.

Microsoft, Windows, Windows NT sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, das Acrobat-Logo, Page-maker, Photoshop und InDesign sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.



Novar GmbH

Dieselstraße 2

41469 Neuss

Telefon +49 (0) 2137 / 17-0

Telefax +49 (0) 2137 / 17-286

Internet:

www.novar.de

E-Mail:

clino@novar.com